



## **Instrukshonnan.**

### **Stap #1:**

Lesa e "Terms & Conditions" i kompletá tur e sèkshonnan riba e "Order Form".

### **Stap #2:**

Kompletá e informashonnan riba e parti dilanti di e ènvelòp "Additional Tested Party". E stap aki ta sumamante importante pa asigná e muestra korekto na e partisipante korekto.

**NOTA: Warda por lo menos 1 ora despues di kome i bebe, promé ku tuma e muestra, .**

### **Stap #3:**

Usando 2 q-tips na mes momento frega firme parti paden na banda di bo boka parti drechi pa por lo menos 30 sèkonde moviendo e q-tipsnan di abou bai ariba i tanten bira e q-tipsnan. Ripití e proseso aki ku e dos otro q-tipsnan na banda robes.

### **IMPORTANTE:**

Kolekshon di muestra ta e stap mas importante. Esaki no ta un test di skupi. Sèlulanan di banda di bo boka ta rekerí.

### **Stap #4:**

Laga e q-tipsnan seka dor di wayanan den airu. Hinka e q-tipsnan direkt den e ènveòp "Additional Tested Party" i sella e ènvelòp. NO hinka e q-tipsnan bèk den e plastik original. Ripití stap 3 i 4 pa e otro partisipantenan usando e otro q-tipsnan den e kit.

### **Stap #5:**

Hinka e "Additional Tested Party" ènvelòpnan i e "Order Form" den e ènvelòp "Buccal Swab Sample Collection Kit". Lesa e instrukshonnan kon pa ship.

**NOTA: Usa e number di track pa track bo pakete.**

### **Resultadonan di e Tèst**

E resultadonan di e tèst ta privá i konfidensial. Denter di 5 - 8 dia di trabou for di e dia ku e mustranan a wordu di ship pa e laboratorio bo ta risibí bo resultado. CDNAC ta tuma kontakto kubo sea via di telefòn òf via e-mail pa asina informabo kon i na unda bo por haña bo resultado. Sea bo por buska bo resultado na un di e ofisinanan di FedEx òf nos por e-mail e resultado pabo. Por fabor yena bo e-mail riba e "Order Form".

**Pa kualke pregunta, yama nos libremente riba 599 9 691-2006 òf 599 9 736-0974.**